

3 STEG TILL CPAP-KOMFORT!

1. VÄLJ SIDA PÅ KUDDEN

Välj mellan det svala och torra ventilerade minnesskummet eller den mjuka fyllningen i plysch för ditt val av komfort.



Fyllning i plysch



Svalt & ventilerat minnesskum

2. VÄLJ DIN HÖJD

Kudden kan ställas in i fyra olika höjder. Lägg till eller ta bort det 3/4-tums mellersta skumlagret för att ställa in kuddens höjd för bästa sömnkomfort!



13,3 cm



7,6 cm



10,8 cm



5,7 cm

3. VÄLJ DITT SLANGBAND

Förhindra att tyngdkraften drar i din slang och flyttar din mask genom att ansluta den inbyggda 18-tums slangremmen. Fäst enkelt änden på remmen runt din slang i en längd som du själv väljer.



Slangrem låter slangen förflytta sig med dig

3-5 DAGARS INVÄNJNING

Din nya kudde kommer att förbättra din kroppshållning och komfort under sömnen! Tillåt 3-5 dagar för kudden att anpassa sig till dig och för dig att anpassa dig till din förbättrade sovställning.

Denna produkt är tillverkad av helt nya textilier och kommer, likt en ny bil, att ha lukten av en ny produkt. Du kan vädra produkten genom att ta bort den fullständigt ur förpackningen och avvakta i 3-5 dagar. För att helt ta bort den "nya lukten" kan även överdraget tvättas. Vänligen följ anvisningarna på skötseletiketten.

Vi uppskattar din verksamhet och önskar dig en förbättrade CPAP-behandling. Om vi kan vara till ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta oss på 1-855-896-8679 eller besök oss på www.cpapmax.com.